




Mai più i fastidi di una lente astigmatica, niente prismi e spessori maggiorati. Per correzioni fino a 1.50D di astigmatismo.

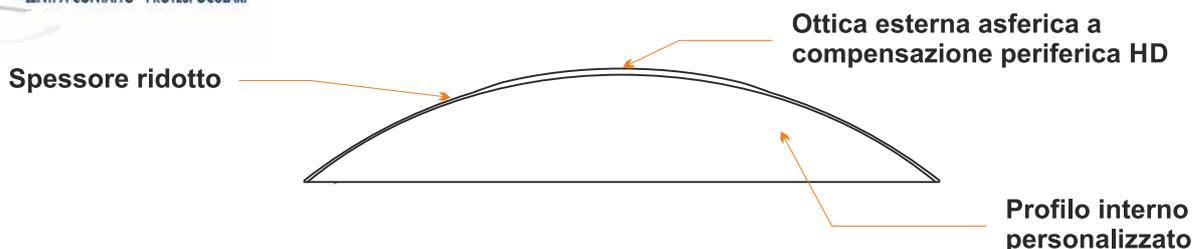

OK^{plus(+)}HD

Mai più i fastidi di una lente astigmatica, niente prismi e spessori maggiorati per correzioni fino a 1.50D di astigmatismo.

- Lente a contatto morbida a compensazione periferica HD che permette anche la correzione degli astigmatismi fino a 1.50D oltre alla migliore definizione delle immagini. Prodotta in materiale SILICONE HYDROGEL al 69% di acqua.
- La lente a contatto **OK^{plus(+)}HD** è una lente a contatto MORBIDA a spessore ridotto, distribuita e concentrica con zona ottica esterna a porzione periferica HD, interno sferica a totale personalizzazione di raggio base e diametro.
- Questa lente sfrutta la zona HD per eliminare le aberrazioni sferiche e per compensare, dove fosse necessario, gli astigmatismi fino a 1.50D con **OK^{plus(+)}HD**

PERCHE' SCEGLIERE «OK^{plus(+)}HD»

- Massima PERSONALIZZAZIONE di RAGGIO BASE, DIAMETRO e POTERE in particolare se la applichi secondo la PROFONDITA' SAGITALE
 - Facile da APPLICARE e CONTROLLARE come una normale disponibile
 - Ricambio frequente TRIMESTRALE
 - FIDELIZZAZIONE del PORTATORE con personalizzazione del prodotto
 - VENDITA propria PROFESSIONALITA' e non il marchio lenti
- PERSONALIZZAZIONE CONFEZIONAMENTO con ETICHETTA con PROPRIO LOGO
 - MAGGIORE PROFITTO

MATERIALE:

- **SILICONE HYDROGEL**, Lucifilcon A, al 69% di acqua ad alto bilanciamento idrico e stabile e resistente ai depositi.
- Non ionico
- DK 60

RICAMBIO:

- Trimestrale

CONFEZIONE: 1 lente in fiala

PARAMETRI DI APPLICAZIONE

- **Scelta Raggio Base:** come una comune lente a ricambio frequente:
 - Raggio Base = Meridiano più piatto +0.60 per un diametro 13.50
 - Raggio Base = Meridiano più piatto +0.70 per un diametro 14.00
 - Raggio Base = Meridiano più piatto +0.80 per un diametro 14.50

SCELTA DEL POTERE

- Nel caso di foro pupillare ampio (maggiore di 4,00 mm) :Addizionare 1/3 dell'astigmatismo in positivo al potere sferico su lente a contatto
- **APPLICAZIONE:** Movimento ideale 1 mm.

GAMMA PRODOTTO

- **Raggio Base:** da 7.00 a 9.80 di 0.10 mm
- **Diametro:** da 12.00 a 16.00 di 0.10 mm
- **Sfero:** da +30.00 a -30.00D di 0.25D
- **Cilindro:** fino a -1.50D
- **Spessore:** 0.11 @-3.00D

MADE IN ITALY

